

Denseo NORM Malfarben Gebrauchsanleitung

Die Denseo NORM Malfarben sind universell auf allen Keramiken ab einer Brenntemperatur von 725°C im Glanzbrand- oder Fixierbrandverfahren einsetzbar. Somit können sie auf jeder niedrig- und hochschmelzenden Keramik, Press- und Fräskeramik sowie Zirkon- und Titankeramik verwendet werden. Selbst auf Zirkonoxid bis maximal 1.050°C können die NORM Malfarben zum Individualisieren eines Gerüsts oder zum Bemalen einer anatomisch geformten Versorgung eingesetzt werden (siehe Brenntabelle unten).

Bitte vor Gebrauch aufrühren!

Sie können die Denseo NORM Malfarben untereinander beliebig mischen, mit dem Liquid bzw. der Glasur verdünnen oder pur anwenden. Achten Sie dabei stets auf einen **sauberen** Pinsel.

Brennanleitung: Brennen Sie die Denseo NORM Malfarben gemäß den Angaben des Herstellers Ihrer verwendeten Keramik. Eine Änderung der Brenndaten ist nicht notwendig.

Hinweis: Nicht im Schwefelbad absäuern!



Brenntabelle zum bemalen von Monolithischen Zirkon Restaurationen:

Starttemperatur:	500°C
Vortrocknen:	4 min.
Heizrate:	65°C/min.
Endtemperatur:	1.050°C
Haltezeit:	1 min.
Vakuum an:	500°C
Vakuum aus:	1.050°C

Wichtig

Die angegebenen Brenntemperaturen sind Richtwerte. Abweichungen auf Grund unterschiedlicher Ofenleistungen sind möglich und müssen gegebenenfalls angepasst werden.